

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ/INSTRUCTION FOR USE

1. Απλώστε το υφασμάτινο κάλυμμα ομοιόμορφα σε μια σκληρή επιφάνεια, φροντίζοντας η σατέν πλευρά να είναι στραμμένη προς τα επάνω./Spread the fabric cushion evenly on a hard surface, making sure the smooth, satin side is facing up. Για να εισάγετε το μαξιλάρι μέσα στο κάλυμμα, διπλώστε απαλά τις δύο επάνω γωνίες (από την πλευρά χωρίς τις βαλβίδες αέρα) και προχωρήστε προς το κέντρο./To begin inserting the cushion into the cover, gently fold the two top corners (without the air valves) of the cushion together toward the middle.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ/NOTE: Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες αέρα βρίσκονται κοντά στο άνοιγμα του καλύμματος./BE SURE THE AIR VALVE(S) ARE NEAR THE COVER OPENING.

2. Σύρετε το μαξιλάρι του καθίσματος στο κάλυμμα μέχρι το μαξιλάρι να είναι σε εντελώς επίπεδη θέση στο εσωτερικό του καλύμματος./Slide the seat cushion into the cover until the seat cushion is laying completely flat inside the cover.

3. Σφραγίστε τις βαλβίδες αέρα και στις δύο πλευρές και τοποθετήστε τις προσεκτικά στο κάλυμμα./Seal the air valves on both sides and gently insert the air valves into the cover.

Εντοπίστε τις δύο οπές της βαλβίδας αέρα στις γωνίες του καλύμματος & τοποθετήστε τις βαλβίδες αέρα μέσα από τις οπές. (* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)/Locate the two air valve holes at the corners of the cover and place the air valves through the holes. (* REMARKS)

4. Τοποθετήστε την άκρη της αντλίας στη βαλβίδα αέρα αρκετά μακριά ώστε να εξασφαλίσετε ότι ανοίγει η αντεπιστροφή εσωτερική βαλβίδα. Μόλις ανοίξει η αντεπιστροφή εσωτερική βαλβίδα, δώστε αέρα & στους δύο αεροθαλάμους. Χρησιμοποιώντας το χέρι σας ως οδηγό, συνεχίστε μέχρι να φτάσετε το επιθυμητό επίπεδο στήριξης του μαξιλαριού του καθίσματος./Place the pump tip into the air valve far enough to ensure the air-leak safety lock opens inside of the valve. Once the air-leak safety lock on the valve is opened. Pump air into both air chambers. Using your hand as guide, continue pumping until reaching the desired support level of the seat cushion.

5. Για να ξεφουσκώσετε ή να ρυθμίσετε το επίπεδο στήριξης του μαξιλαριού του καθίσματος, απλά περιστρέψτε τη βαλβίδα αέρα στο πλάι για να ανοίξει η βαλβίδα ασφαλείας αέρα-lock και πιέστε προς τα κάτω./To deflate or adjust the support level of the seat cushion, simply twist the air valve sideways to open the air-lock safety valve and press down.

6. Σφραγίστε το κάλυμμα γύρω από το μαξιλάρι με απλή προσάρτηση του Velcro στα άκρα./Seal the cover around the cushion by simply attaching the Velcro ends to each other.

7. Κλείστε τις βαλβίδες αέρα και στις δύο πλευρές και τοποθετήστε τις προσεκτικά στο κάλυμμα./Seat the air valves on both sides and gently insert the air valves into the cover.

8. Τοποθετήστε την γκρι, αντιολισθητική πλευρά του καλύμματος προς τα κάτω./Place the gray, anti-slip side of the cover facing down on the sitting surface.

* Σημείωση/Remark

Μαξιλάρι Μονού Θαλάμου/Single Chamber Cushion

Εντοπίστε το ακροφύσιο του θαλάμου αέρα & τοποθετήστε την αντλία μέσα στο ακροφύσιο. Χρησιμοποιώντας τη χειροκίνητη αντλία, γεμίστε το θάλαμο με αέρα έως ότου κάθε ένα από τα επιμέρους τμήματα αέρα γεμίσουν με την επιθυμητή ποσότητα αέρα./Locate Air Chamber Nozzle And Place Pump Tip Into The Nozzle. Using Hand Pump Action, Fill The Air Chambers With Air Until Each Of The Individual Air Cells Are Filled The Amount Of Air.

Μαξιλάρι Διπλού Θαλάμου/Double Chamber Cushion

Εντοπίστε τα ακροφύσια και τοποθετήστε την αντλία μέσα σε αυτά. Χρησιμοποιώντας τη χειροκίνητη αντλία, γεμίστε το θάλαμο με αέρα έως ότου φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο ανακούφισης της πίεσης. Ρυθμίστε την πίεση και στις δύο πλευρές του μαξιλαριού με την προσθήκη ή τη μείωση της ποσότητας του αέρα σε κάθε θάλαμο./Locate Both Air Chamber Nozzles And Place Pump Tip Into The Nozzles. Using Hand Pump Action, Fill The Air Chambers With Air Until Reaching The Desired Pressure Relief Level. Adjust The Pressure On Either Side Of The Cushion By Adding Or Reducing The Amount Of Air In Each Chamber.