

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥ**  
**Bath Chair User Manual**



**0806505**



**0808678**



**0806064**



**0808522**



**0808523**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ/Instructions of use**

Η καρέκλα μπάνιου είναι σχεδιασμένη για να επιτρέψει σε άτομα με κινητικά προβλήματα να μπορούν να κάνουν το μπάνιο τους ενώ κάθονται σε αυτήν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εντός ή εκτός της μπανιέρας, στην ντουζιέρα ή να βιδωθεί στα τοιχώματα (ΜΟΝΟ το μοντέλο 0808678)./ The bath chair is designed to allow disabled people to be able to enjoy a bath while sitting on it. Can be used inside or outside of the tub , the shower or screwed to the walls (ONLY model 0808678 ).

**Πριν την χρησιμοποιήσετε ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι/Before using it take care of the following:**

- **Ότι είναι σωστά συναρμολογημένη./** That the chair is correctly assembled.
- **Ότι τα άκρα της ακουμπούν σταθερά στο πάτωμα./** That the legs ends firmly touching the floor.
- **Ειδικά για το μοντέλο 0808678, βεβαιωθείτε ότι την έχετε στερεώσει με ασφάλεια στον τοίχο & τα άκρα της ακουμπούν σταθερά στο πάτωμα./** Specific to the model 0808678 , make sure that you have securely fastened to the wall and the legs firmly flat on the floor.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: **ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε/ΜΟΒΙΑΚ S.A**

Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 96-98 ΤΚ. 73136- ΤΗΛ: 28210 63222,ΧΑΝΙΑ-ΚΡΗΤΗΣ

Μ.Μποτσάρι 96-98, 73136 Chania-Crete, Greece

Web site: <http://www.mobiakcare.gr>, e-mail: [mobiakcaresales@mobiak.gr](mailto:mobiakcaresales@mobiak.gr)

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την καρέκλα μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα./ If trouble occurs in any of the above DO NOT use the seat until the problem is resolved.

#### ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ FURTHER INSTRUCTIONS

1. Τοποθετήστε την καρέκλα στο πάτωμα και ελέγξτε ότι εφαρμόζει σωστά σε αυτή τη θέση./ Position the on the floor and check that it is correctly in this position.
2. Ρυθμίστε το ύψος των άκρων, εφόσον απαιτείται./If necessary, adjust the height.
3. Μεταφέρετε το χρήστη στην καρέκλα./ Transfer the user in the chair .
4. Βεβαιωθείτε ότι η καρέκλα είναι ασφαλισμένη και δεν ταλαντεύεται πριν ξεκινήσετε το μπάνιο./ Make sure that the chair is secure and does not swing before starting the bath.
5. Μην αφήνετε τον χρήστη μόνο του, χωρίς επίβλεψη./ Do not leave the user alone, unsupervised.

#### Εγγύηση/Warranty:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση/συντήρηση του προϊόντος./ The product has a warranty period of one (1) year. The warranty covers factory defects and not damages from misuse/maintenance product.