

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΑΡΘΗΚΑ Air Cast AIR CUSHION INSTRUCTIONS

Συμβουλευτείτε τον Ιατρό ή τον νοσηλευτή για την ορθή χρήση πριν τοποθετήσετε τον νάρθηκα.

Patients should always consult their physician or health care professional for proper instructions prior to using ankle support.


Φοράτε πάντα κάλτσα & δετό παπούτσι μαζί με τον νάρθηκα.

Always wear an absorbent sock and laced shoe with the ankle support.

Ο Νάρθηκας μπορεί να πλυθεί με νερό & σαπούνι. Αφήστε τον να στεγνώσει πριν τον τοποθετήσετε ξανά.

Ankle support can be washed with mild soap and water, and should be air dried only.

ΒΗΜΑ 1^ο / STEP 1

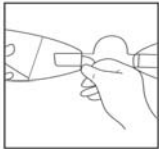

Ανοίξτε το αυτοκόλλητο & ρυθμίστε τον ιμάντα της πτέρνας.

Open ankle stirrup and adjust heel strap.

ΒΗΜΑ 2^ο / STEP 2



Φορέστε τον νάρθηκα & βεβαιωθείτε ότι τα πλαϊνά στηρίγματα είναι στο κέντρο μεταξύ κνήμης & αστραγάλου.

Step into the brace and make certain the side stirrups are centered along the lower leg and ankle.

ΒΗΜΑ 3^ο / STEP 3



Σφίξτε τον κάτω ιμάντα γύρω από τον νάρθηκα & το πόδι.

Wrap the lower strap snugly around the brace.

ΒΗΜΑ 4^ο / STEP 4



Σφίξτε τον πάνω ιμάντα & ξαναρυθμίστε των κάτω έως ότου πετύχετε την τέλεια εφαρμογή.


ΒΗΜΑ 5° / STEP 5



Φορέστε το παπούτσι & δέστε τα κορδόνια του.

Step into shoe and tighten laces.

ΒΗΜΑ 6° / STEP 6

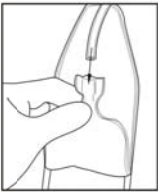

Εφόσον απαιτείται φουσκώστε τον νάρθηκα χρησιμοποιώντας το πουάπ. Μην φουσκώνετε περισσότερο απ' ότι απαιτείται για την σωστή εφαρμογή (περίπου ¼").

If necessary, inflate the bladders with the air tubes provided. Do not overinflate. The proper level should be approximately 1/4" .

Εγγύηση/Warranty:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση/συντήρηση του προϊόντος./ The product has a warranty period of one (1) year. The warranty covers factory defects and not damages from misuse/maintenance product.