



**GR
EN**

MOBIACARE®
MEDICAL EQUIPMENT

Περιπατητήρας διπλής διαμόρφωσης Rollator 0810615

Περιπατητήρας Rollator 0810616

Περιπατητήρας 3τροχος Rollator 0810617

Double formation Walkman Rollator 0810615

Rollator Walker 0810616

Walker 3-Wheels Rollator 0810617



0810615

- Χρώμα Μπλε
- Χειρολαβές ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Κυλιόμενοι με φρένα στις χειρολαβές
- Διαθέτουν κάθισμα και καλάθι
- Δυνατότητα μεταφοράς του χρήστη
- Στήριγμα πλάτης διπλής κατεύθυνσης στήριξης μετατρέπει τον περιπατητήρα σε αμαξίδιο μεταφοράς
- Βαφή των προϊόντων που έχει ως βάση την νανοτεχνολογία, η οποία καθιστά τη βαφή πιο ανθεκτική.
- Color Blue
- Adjustable height adjustable handles
- Moving with brakes on the handles
- They have a seat and a basket
- Possibility of transferring the user
- Two-way back support bracket turns the walker into a transport wagon
- Dyeing of products based on nanotechnology, which makes the paint more durable.

Χαρακτηριστικά / Specifications

41cm	64cm	52cm	97-107cm	7Kg	100Kg



0810616

- Χρώμα Μπλε
- Κυλιόμενος με φρένα στις χειρολαβές
- Διαθέτει κάθισμα και καλάθι
- Χειρολαβές ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Color Blue
- Rolling with brakes on the handles
- It has a seat and a basket
- Adjustable height adjustable handles

Χαρακτηριστικά / Specifications


46cm	64cm	56cm	83-93cm	6Kg	100Kg

0810617



- Χρώμα Μπλε
- Χειρολαβές με φρένα, ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Διαθέτει καλαθάκι και τσάντα
- Ρόδες Διαστάσεων 200x50mm
- Color Blue
- Adjustable height brakes with brakes
- Has a basket and a bag
- Dimensions 200x50mm

Χαρακτηριστικά / Specifications

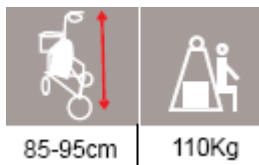

Πριν χρησιμοποιήσετε τον περιπατητήρα **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ** ότι:

- § Οι ρόδες είναι καλά στερεωμένες.
- § Τα φρένα λειτουργούν κανονικά.
- § Οι χειρολαβές είναι στο ίδιο ύψος και οι βίδες που τις στερεώνουν στο σκελετό είναι καλά σφιγμένες.
- § Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό.
- § Η μπάρα για την πλάτη είναι στερεωμένη καλά στο σκελετό

Before Using the Walker **BEARING INSPECTION** that:

- § The wheels are well fixed.
- § Brakes operate normally.
- § The handles are at the same height and the screws that secure them to the frame are well tightened.
- § There are no cracks or fractures in the frame.
- § The backrest bar is securely fastened to the frame

Protecting the environment / Προστατεύοντας το Περιβάλλον

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or If it is of no further use to you, think of the protection of the environment / εάν κάποια ημέρα η συσκευή χρειαστεί αντικατάσταση ή δεν την χρειάζεστε πια, σκεφτείτε το περιβάλλον:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign). / Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με το υπόλοιπα δημόσια απόβλητα (αυτό είναι επίσης το νόημα της αναγραφόμενης σήμανσης ανακύκλωσης).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your appliances must be disposed. / Επικοινωνήστε με τις δημόσιες αρχές σας και θα σας καθοδηγήσουν στα κέντρα ανακύκλωσης στα οποία πρέπει να διατεθούν οι συσκευές σας.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components. / Η σωστή απόρριψη της συσκευής σας βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην ανακύκλωση των εξαρτημάτων αυτής.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards. / Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών τους, αν δεν διατεθούν σωστά, μπορεί να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικούς και επιπλέον κινδύνους για την υγεία.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για **ένα (1) έτος**. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση/συντήρηση του προϊόντος. Περίοδος Εγγύησης ορίζεται από την Ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς

Φόρμα Εγγύησης

Στοιχεία Αγοραστή

Όνοματεπώνυμο :

Ημ/νία Αγοράς:

Τηλέφωνο:

Στοιχεία Καταστήματος

Επωνυμία :

Διεύθυνση:.....

Τηλέφωνο:

Σφραγίδα καταστήματος

WARRANTY:

The product has a warranty period of **one (1) year**. The warranty covers factory defects and not damages from misuse/maintenance product. Applicable warranty period starts from the purchasing invoice date

Warranty Claim Form:

Buyers Data

Name :

Date of purchase:

Phone:

Resellers Data

Name :

Address :

Phone:

Reseller Stamp