

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΩΝ ROLLATOR
0809175, 0808368, 0808717, 0807567, 0810007



Ο περιπατητήρας Rollator παραδίδεται συναρμολογημένος./ The Rollator walker is delivered assembled

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ/INSTRUCTIONS FOR USE

Ο περιπατητήρας Rollator μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με περιορισμένη κινητικότητα και βάρους έως 100 Kg. για τις μετακινήσεις εντός και εκτός του σπιτιού./ The Rollator walker can be used by people with limited mobility and weighing up to 100 Kg. for travel within and outside the home.

Πριν χρησιμοποιήσετε τον περιπατητήρα Rollator ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι/ Before using the Rollator walker make sure that:

- **Οι ρόδες είναι καλά στερεωμένες./ The wheels are firmly fixed**
- **Τα φρένα λειτουργούν κανονικά./ The brakes are working properly**
- **Οι χειρολαβές είναι στο ίδιο ύψος και οι βίδες που τις στερεώνουν στο σκελετό είναι καλά σφιγμένες./ The handles are the same height and the screws that secure them on the frame are tight.**
- **Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό./ There are no cracks or fractures in the frame.**
- **Το κάθισμα είναι τοποθετημένο στο μέσον, ο μηχανισμός που το στερεώνει στο σκελετό είναι ανθεκτικός και οι βίδες καλά σφιγμένες./ The seat is positioned in the middle, the mechanism that secures the frame is resistant and screws tight.**
- **Η μπάρα για την πλάτη είναι στερεωμένη καλά στο σκελετό./ The bar for the back is well secured to the frame.**

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον περιπατητήρα μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα./ If trouble occurs in any of the above DO NOT use the walker until the problem is resolved .

MOBIAK A.E
Μ.Μπότσαρη 96-98, Χανιά-Κρήτης

MOBIAK S.A
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΙ 96-98 Chania-Crete, Greece
+30-28210-63222

www.mobiakcare.gr Email: mobiakcaresales@mobiak.gr



ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ FURTHER INSTRUCTIONS

- Όταν κάθεστε ή σηκώνεστε από τον περιπατητήρα πρέπει να τοποθετούνται τα φρένα στη μόνιμη θέση (πιέζοντας τη λαβή προς τα κάτω) ώστε ο περιπατητήρας να μένει ακίνητος και να μη γλιστρά./ When sitting or standing up from the walker placed the brakes should be in locking position (by pushing the handle down) securing that the walker will stand still and not slip.
- Όταν σηκώνεστε από τον περιπατητήρα πρέπει να στηρίζετε και στις δύο χειρολαβές ισομερώς. Στήριξη μόνο στο ένα χέρι (και χωρίς συνοδό) μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη λαβή./ When you get out of the walker must rely on both handles equally. Leaning only to one handle (without escort) can damage the handle.
- Όταν κάθεστε ή σηκώνεστε από τον περιπατητήρα προσέξτε να μην αγκιστρωθούν τα ρούχα σας σε αυτό./ When sitting or standing up from the walker careful not hooked your clothes in it.
- Να καθαρίζετε τακτικά τον περιπατητήρα, ιδίως το πλαστικό του καθίσματος./ Regularly clean the walker , especially the plastic seat.
- Μην αφήνετε τον περιπατητήρα βρεγμένο./Do not let the walker wet.
- Μην αφήνετε παιδιά κοντά στον περιπατητήρα χωρίς επίβλεψη./ Do not let children near the walker without supervision

Εγγύηση/Warranty:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση/συντήρηση του προϊόντος./ The product has a warranty period of one (1) year. The warranty covers factory defects and not damages from misuse/maintenance product.

MOBIAK A.E
Μ.Μπότσαρη 96-98, Χανιά-Κρήτης

MOBIAK S.A
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΙ 96-98 Chania-Crete, Greece
+30-28210-63222

www.mobiakcare.gr Email: mobiakcaresales@mobiak.gr

